



MANUAL DE INSTRUCCIONES

MESA INSTRUMENTAL // PA-610

Revisión 01/14



INDICE

01	INTRODUCCIÓN	
01.1	Utilización del manual	05
01.2	Ficha técnica	06
02	FUNCIONAMIENTO	
02.1	Instalación	13
02.2	Sistema de fijación	14
03	MONTAJE Y DESPIECE	
03.1	Explosionado general	19
03.2	Listado de referencias	26
04	MANTENIMIENTO GENERAL	34
05	GARANTÍA DE PRODUCTO	35





01 INTRODUCCIÓN

01.1 Utilización del manual

El contenido del manual, incluye instrucciones de utilización y de mantenimiento del producto, así como también la manera de resolver pequeñas averías que pudieran surgir.

Se recomienda antes de poner en funcionamiento el producto, se lean detenidamente este manual, para evitar deterioros a causa de una mala utilización.

No pierda este documento, debe estar accesible a cualquier consulta que pudiera surgir por parte del personal sanitario.

Recuerde, un buen uso y mantenimiento son necesarios para el buen funcionamiento del producto.

Cada producto lleva incorporada una etiqueta adhesiva identificativa con el número de serie y el modelo. Conserve estos números para poderlos indicar al distribuidor en caso necesario.



01 INTRODUCCIÓN

01.2 Ficha técnica

MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS // PLEGADA

LARGO 635 mm

ANCHO 390 mm

ALTO 50 mm

PESO 4.6 Kg

CARGA MÁX. 35 Kg

MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS // DESPLEGADA





LARGO 635 mm

ANCHO 390 mm

ALTO 380 mm

PESO 4.6 Kg

CARGA MÁX. 35 Kg

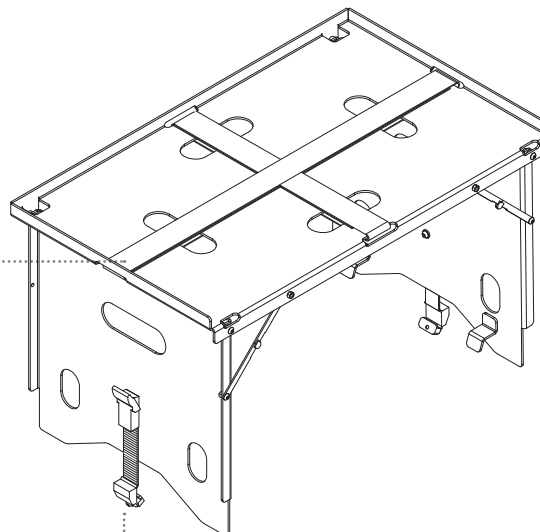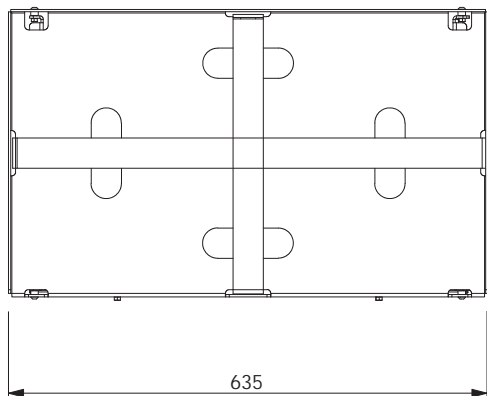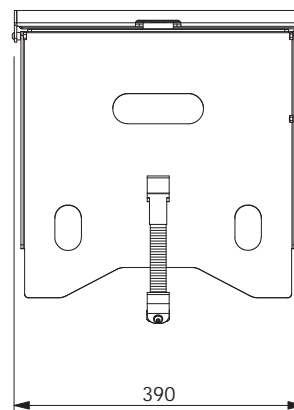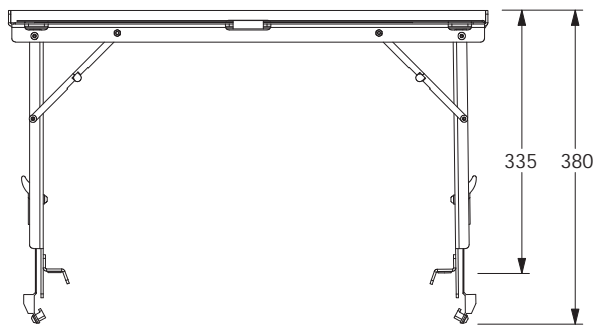

CINTAS DE NYLON EN CRUZ CON VELCRO INCLUIDO
UTILIZE LAS CINTAS PARA AMARRAR LOS INSTRUMENTOS CON SEGURIDAD



ENGANCHE RÁPIDO Y FACILMENTE AJUSTABLE
ESTA MESA INSTRUMENTAL ES APTA PARA TODOS LOS MODELOS DE CAMILLAS PROMEBEA





02 FUNCIONAMIENTO

02.1 Instalación

Primero de todo saque el producto del embalaje.

Paso 1

· Coloque la mesa en un lugar plano, con las solapas en la parte superior

Paso 2

· Levante la solapa superior en un ángulo de 90°

· Compruebe que el compás quede completamente extendido y en posición de bloqueo

Paso 3

· Siga las instrucciones del Paso 2 con la solapa inferior

· Compruebe también que el compás queda en posición de bloqueo



Paso 4

· Ponga la mesa con el sobre en la parte de arriba, como se muestra en la foto

· Afloje los enganches de cada solapa

Paso 4

· Coloque la mesa en la parte trasera de la camilla, como se muestra en la foto

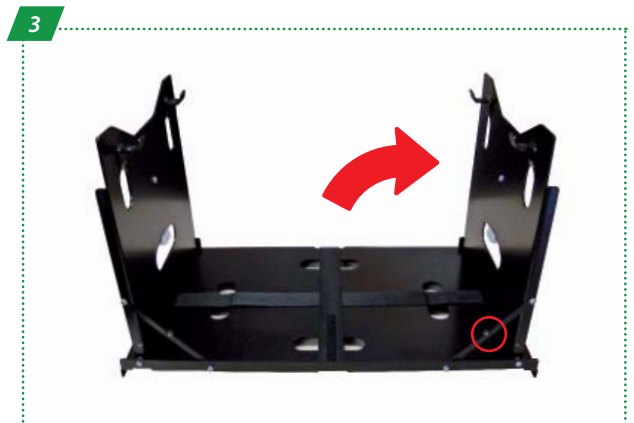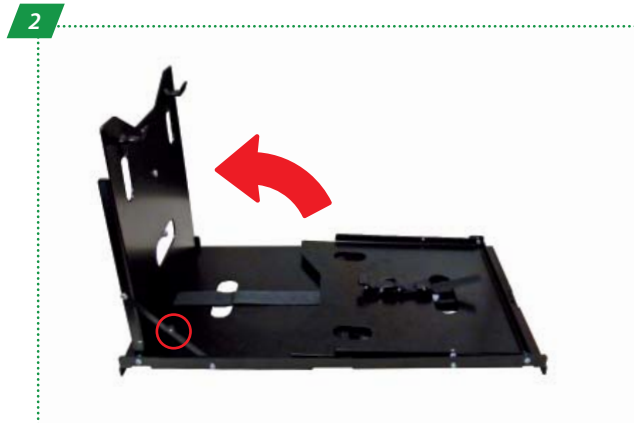

02 FUNCIONAMIENTO

02.2 Sistema de fijación

Paso 1

· Encaje los ganchos interiores encima del perfil de la camilla (ver imagen 1)

Paso 2




· Sitúe la correa dentada hacia abajo y delice hasta el extremo el gancho inferior (ver imagen 2)

Paso 3

· Coloque el gancho en el lateral del perfil de la camilla (ver imagen detalle 3a)


· Con una mano mantenga el gancho en la posición de la imagen 3a, con la otra suba la palanca hacia arriba como se muestra en la imagen 3b

· No apriete en exceso el conjunto, podría deformarse

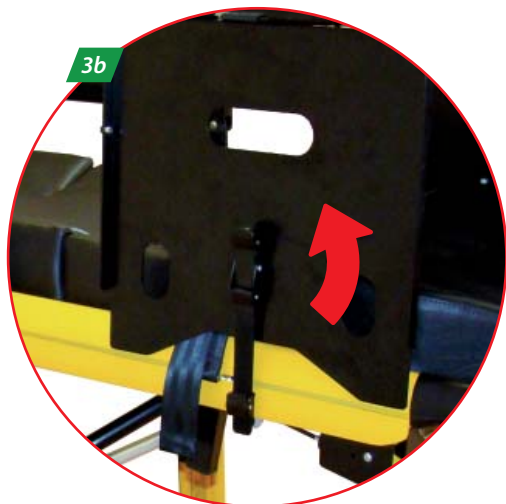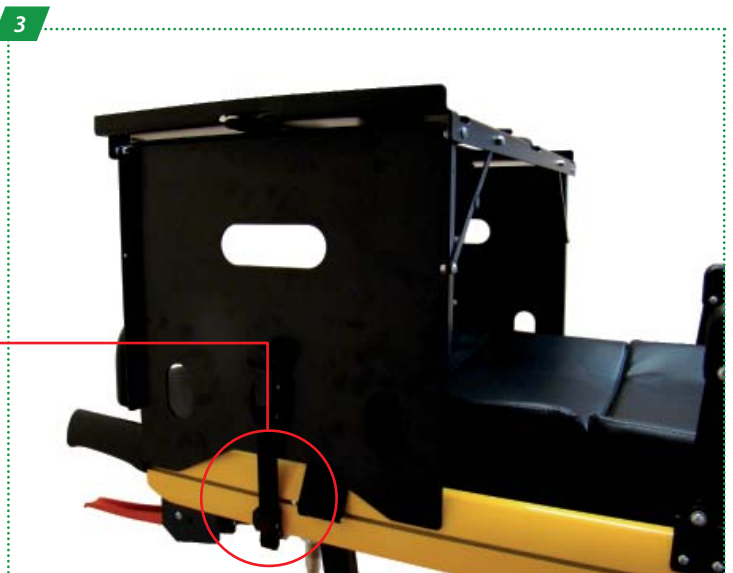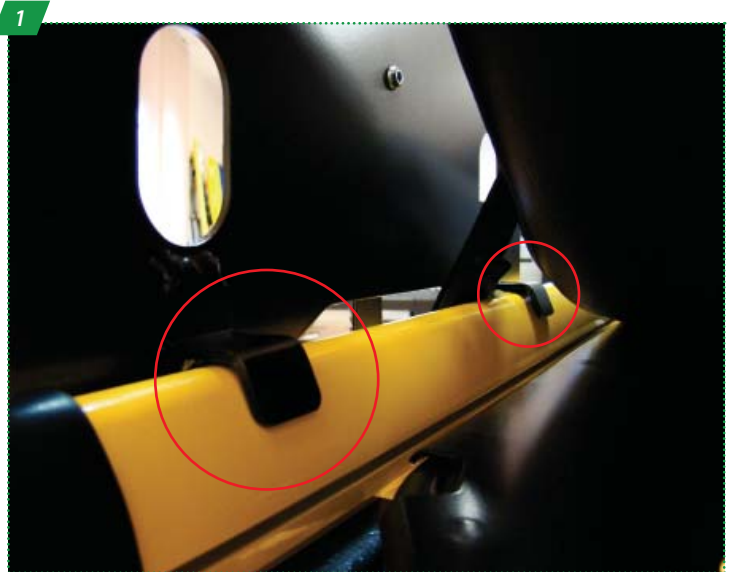

03 MONTAJE Y DESPIECE

03.1 Explosionado general

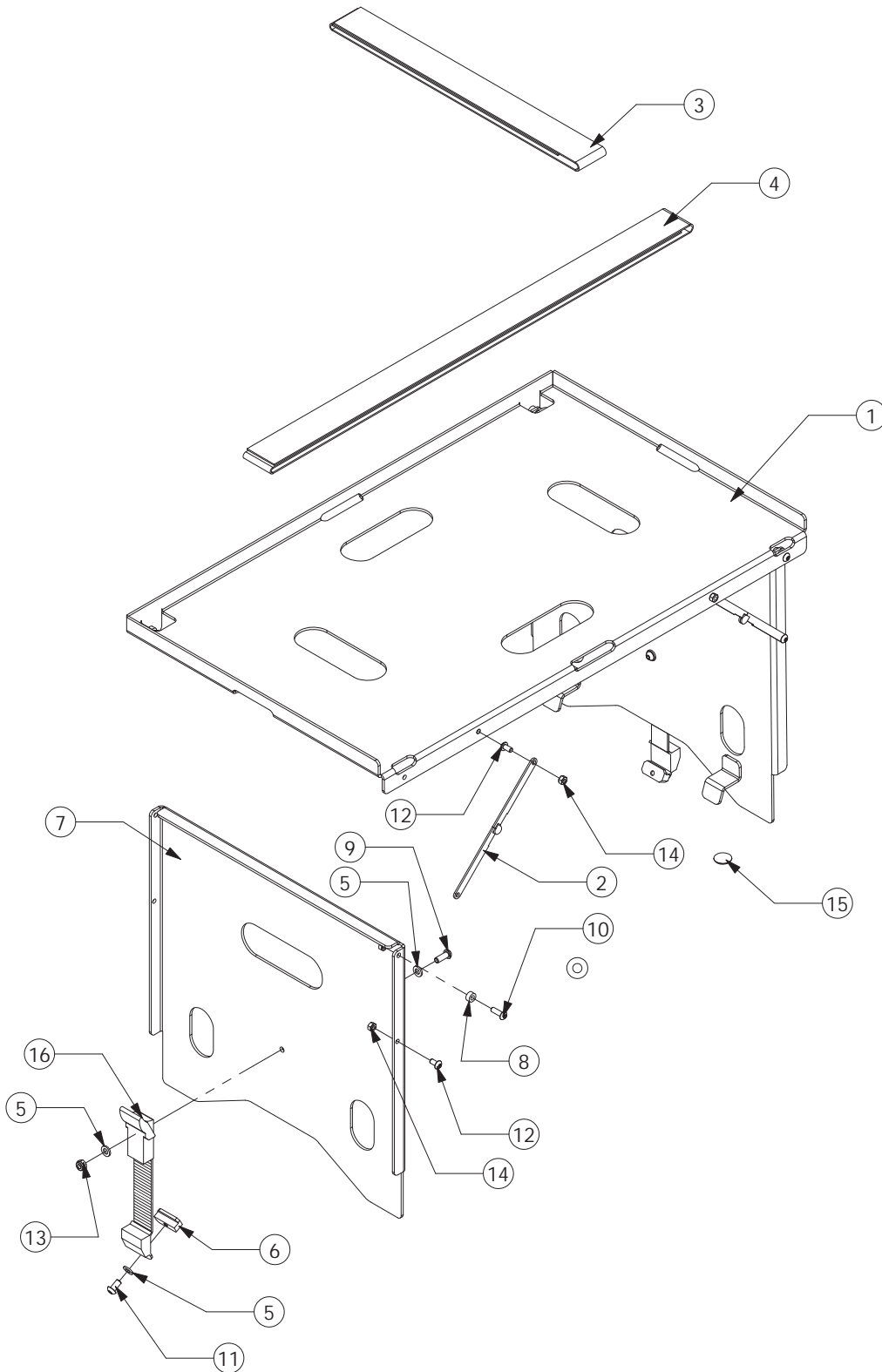



03.2 Listado de referencias

ITEM NO.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
1	PC6100-05012	SOBRE MESA UNIVERSAL	1
2	PC6500-05050	COMPAS BLOQUEO	1
3	PC6500-05100	CINTA SUJECIÓN MESA 1 METRO	1
4	PC6500-05110	CINTA SUJECIÓN MESA 1,8 METROS	1
5	31201061	ARANDELA D-125 M6 CINCADA	6
6	PC6100-05060	TOPE NYLON MESA UNIVERSAL	2
7	PC6100-05022	LATERAL MESA UNIVERSAL	2
8	PC6500-03470	CASQUILLO SEPARADOR NYLON BLANCO	4
9	3111306161	TORNILLO ISO-7380 M6x16 CINCADO	2
10	3111305161	TORNILLO ISO-7380 M5x16 CINCADO	4
11	3111306121	TORNILLO ISO-7380 M6x12 CINCADO	2
12	3111305101	TORNILLO ISO-7380 M5x10 CINCADO	4
13	31305061	TUERCA D-985 M-6 CINCADA	2
14	31305051	TUERCA D-985 M-5 CINCADA	8
15	461241	PATA AUTOADHESIVA	4
16	PC6100-05040	CIERRE CARRACA	2
16	PC6100-05050	CINTA DENTADA	2

06 MANTENIMIENTO GENERAL

LIMPIEZA

Mantener el equipo limpio es fundamental para garantizar un buen uso y durabilidad del conjunto. Es necesario efectuar una limpieza en profundidad periódicamente, especialmente en zonas de fácil acceso expuestas a la suciedad.

ZONAS DE DESGASTE

Inspeccionar regularmente para ver si hay desgaste en los componentes del sistema es una medida preventiva que puede disminuir averías. Verifique posibles costuras en mal estado en las cintas de sujeción, compases doblados o tornillos en mal estado.

ELEMENTOS DE FIJACIÓN MECÁNICA

En general llamamos elementos de fijación mecánica a los componentes que se utilizan para fijar el conjunto del producto, principalmente tornillería y derivados.


En algunas condiciones de uso, debido a vibraciones o impactos, ciertos elementos pueden perder su par de apriete o propiedades de fijación.

Revise periódicamente que no existan elementos sueltos, sobretodo en partes móviles del conjunto. Tenga en cuenta y respete siempre los pares de apriete recomendados.

SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES

Este manual de instrucciones no incluye procedimientos para todas las piezas. Lo habitual es que el personal de servicio cualificado sustituya los cables, los conmutadores y ciertas piezas mecánicas sin necesidad de procedimientos paso a paso.

El personal de servicio técnico cualificado deberá ponerse en contacto con nuestro departamento comercial para obtener información sobre el pedido de piezas y su instalación.

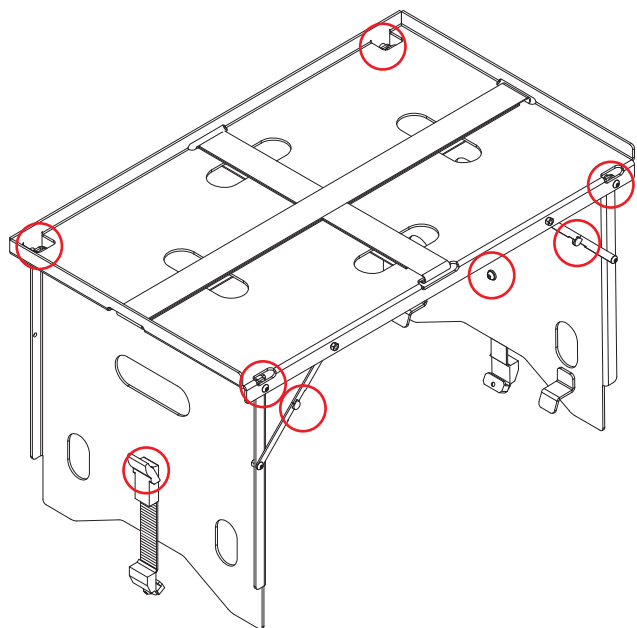

ASEGURESE DE MANTENER ESTAS ZONAS LIBRES DE SUCIEDAD.
PONGA ESPECIAL CUIDADO EN SU LIMPIEZA PARA ASEGURAR UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO.

07 AVISOS LEGALES

Es posible que este documento contenga imprecisiones técnicas o errores tipográficos.

Periódicamente se efectúan cambios en la información aquí contenida; dichos cambios se incorporaran en nuevas ediciones de la publicación.

Promeba, S.L. se reserva el derecho a realizar, si lo considera oportuno, cualquier modificación o mejora en los productos que se describen en esta publicación.

Promeba, S.L. puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que aborden temas descritos en este documento. La posesión de este documento no confiere ninguna licencia sobre dichas patentes.

La información contenida en este documento no afecta ni cambia las especificaciones o garantías del producto de **Promeba, S.L.**

Ninguna parte de este documento deberá regir como licencia explícita o implícita o indemnización bajo los derechos de propiedad intelectual de **Promeba, S.L.** o de terceros.

Toda la información contenida en este documento se ha obtenido en entornos específicos y se presenta como ilustración. Los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar.

Promeba, S.L. puede utilizar o distribuir la información que le suministre el cliente de la forma que crea oportuna, sin incurrir en ninguna obligación con el cliente.

08 GARANTÍA DE PRODUCTO

Promeba, S.L. garantiza que sus productos han pasado satisfactoriamente todos los controles de calidad establecidos, tanto funcionales, como materiales. La duración de la garantía es de 2 años a partir de la fecha de compra del producto.

Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura original o comprobante de compra (indicando la fecha de compra, modelo y el nombre del distribuidor) junto con el producto defectuoso durante el periodo que cubre la garantía. **Promeba, S.L.** se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan los documentos indicados o si la información que los mismos contienen es incompleta o ilegible.

1. Esta garantía no será de aplicación si el nombre del modelo o el número de serie del producto ha sido alterado, borrado, ha desaparecido o resulta ilegible.

*2. Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados del transporte de su producto a y desde **Promeba, S.L.***

3. Esta garantía no cubre ninguno de los supuestos siguientes:

a) Mantenimiento periódico y reparación o sustitución de piezas derivado del uso y desgaste normales.

b) Material fungible (componentes que se prevé necesiten recambios periódicos durante la vida del producto, tales como baterías no recargables, bombillas, etcétera).

c) Daños o defectos derivados del uso, funcionamiento o tratamiento del producto indebidos y no por causa de un uso normal del producto.

d) Daños derivados de:

i. Uso indebido, incluido:

- Tratamiento que derive en daños o cambios físicos, superficiales o de apariencia del producto.

- Instalación, utilización o almacenamiento del producto de manera que no respete las instrucciones descritas por **Promeba, S.L.**

- Mantenimiento del producto de manera que no respete las instrucciones de **Promeba, S.L.** para su debido mantenimiento.

- Instalación o utilización del producto de manera que no respete las normas técnicas o de seguridad del país donde es usado o instalado.

ii. Utilización de componentes no proporcionados con el producto o instalación incorrecta de partes accesorias no testadas anteriormente.

iii. Estados o defectos del sistema en el que se usa o se incorpora el producto con la excepción de otros productos **Promeba, S.L.** diseñados para su uso con el producto.

iv. Utilización del producto con accesorios, unidades periféricas y otros productos de un tipo, condición o normas no establecidas por **Promeba, S.L.**

v. El fabricante o distribuidor será el único responsable en decidir el envío de las piezas para su reparación, o bien la sustitución del producto en su totalidad. En ningún caso se enviarán operarios para dicha reparación o sustitución del producto.

Excepto en los casos mencionados más arriba, **Promeba, S.L.** no otorgará garantías con relación al producto, el funcionamiento, la precisión, la fiabilidad o la adaptabilidad a una finalidad del equipo lógica o de otro tipo. Si esta excepción no es lícita o contemplada por la ley vigente, **Promeba, S.L.** limitará o excluirá sus garantías sólo en la medida en que la ley vigente lo permita.

La única obligación por parte de **Promeba, S.L.** en relación con esta garantía es reparar o sustituir las piezas sujetas a los términos y condiciones de esta garantía.

Promeba, S.L. no es responsable de la pérdida o daño de productos, esta garantía u otros, incluyendo pérdida económica o daños no evaluables; el precio pagado por el producto; pérdida de beneficios, ingresos, información, usufructo o utilización del producto o de productos asociados o pérdida o daños indirectos, accidentales o críticos.

Esta cláusula se refiere a si la pérdida o daños es debida a deterioro o inoperatividad del producto asociado por defectos o indisponibilidad de **Promeba, S.L.**, que ha causado un tiempo de inactividad, la pérdida del tiempo del usuario o una interrupción del negocio.

En los casos en los que la ley prohíba o limite estas exclusiones de responsabilidad, **Promeba, S.L.** excluirá o limitará su responsabilidad sólo en la medida en la que la ley vigente lo permita. Por ejemplo, hay países que prohíben la exclusión o limitación de daños provocados por negligencia, negligencia temeraria, falta deliberada, fraude y actos similares. La responsabilidad de **Promeba, S.L.** en esta garantía no excederá, en ningún caso, el precio pagado por el producto, pero si la ley vigente permite únicamente limitaciones de responsabilidades mayores, éstas se aplicarán.





Todos los derechos reservados. Reservado el derecho ha modificaciones sin previo aviso.
Promeba, S.L. no se considera responsable de los daños causados por la falta o la inexactitud de la información aquí mencionada.

*All rights reserved. Variations can be done whitout notice.
Promeba, S.L. is to be considered not responsible for damages caused by the lack or the wrongness of the information here mentioned.*



PROMEBA, S.L.

Ctra C-16 Km 59,5 · 08650 Sallent (Barcelona) · SPAIN
T. 93 837 12 00 · Fax 93 820 61 08
promeba@promeba.com · www.promeba.com