



MANUAL DE MANTENIMIENTO / SERVICE USER GUIDE  
CAMILLA SERIE PC-900/7 / STRETCHER SERIE PC-900/7

REV. 2025/09

## 00 ÍNDICE

01	MODELOS.....	4
01.1	Productos.....	4
01.2	Accesorios.....	5
02	INTRODUCCIÓN.....	6
02.1	Utilización del manual.....	6
02.2	Atención al cliente.....	6
02.3	Etiquetado.....	6
03	ADVERTENCIAS.....	7
03.1	Advertencias generales.....	7
03.2	Advertencias específicas.....	8
04	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	8
04.1	Partes principales.....	9
04.2	Partes principales (accesorios).....	12
05	MANTENIMIENTO.....	14
05.1	Aspectos generales.....	14
05.2	Solución de problemas.....	15
06	MANTENIMIENTO GENERAL.....	16
06.1	Limpieza.....	16
06.2	Lubricación.....	16
06.3	Áreas de desgaste.....	17
06.4	Programa de mantenimiento.....	17
07	RECAMBIOS.....	19
08	REGISTRO DE MANTENIMIENTO.....	22
09	AVISOS LEGALES.....	23

## 01 MODELOS

### 01.1. Productos

REFERENCIA	CÓDIGO UDI	DESCRIPCIÓN COMERCIAL
PC9017-00000	8436601871145	CONJUNTO CAMILLA PC-901/7
PC9010-00000	8437021314359	CONJUNTO CAMILLA PC-901
PC9027-00000	8436601871084	CONJUNTO CAMILLA PC-902/7
PC9020-00000	8437021314366	CONJUNTO CAMILLA PC-902
PC9117-00000	8436601871121	CONJUNTO CAMILLA PC-911/7 PERFORMANCE
PC9110-00000	8437021314373	CONJUNTO CAMILLA PC-911
PC9127-00000	8436601871107	CONJUNTO CAMILLA PC-912/7
PC9120-00000	8437021314380	CONJUNTO CAMILLA PC-912
PC9130-00000	8437021314397	CONJUNTO CAMILLA PC-913
PC9217-00000	8436601871183	CONJUNTO CAMILLA PC-921/7
PC9210-00000	8437021314427	CONJUNTO CAMILLA PC-921
PC9227-00000	8436601871138	CONJUNTO CAMILLA PC-922/7
PC9220-00000	8437021314434	CONJUNTO CAMILLA PC-922
PC9510-00000	8437021314441	CONJUNTO CAMILLA PC-951 FOWLER
PC9520-00000	8437021314458	CONJUNTO CAMILLA PC-952 FOWLER
PE04-PC901	8436601871831	CONJUNTO CAMILLA PC-901/7 Especial CAT
PE05-PC901	8436601871817	CONJUNTO CAMILLA PC-901/7 Especial CAT
PE05-PC911	8436601871114	CONJUNTO CAMILLA PC-911 Especial CAT

## 01 MODELOS

### 01.2. Accesorios

REFERENCIA	CÓDIGO UDI	DESCRIPCIÓN COMERCIAL
PA5351-00000	8437001519941	CONJUNTO CIERRE 3 PUNTOS PA-5351
PA5352-00000	8437001519958	CONJUNTO CIERRE 3 PUNTOS PA-5352
PA5500-00000	8437001519965	CONJUNTO CIERRE UNIVERSAL PA-550
PA-750	8437021314694	COLCHON TERMOSELLADO IGNIFUGO PA-750
PA-632	8437021314700	COLCHÓN TERMOSOLDADO PROMEBBA PA-632
PC6100-05000B	8437021314960	MESA INSTRUMENTAL PLEGABLE
PA5250-00000	8437021314977	PORTABOTELLA DE OXÍGENO
PA7600-00000A	8436601870773	KIT BARIATRICO PARA SERIE 900
PA-235	8436601870285	TABLA TRANSFERENCIA PLEGABLE

## 02 INTRODUCCIÓN

### 02.1. Utilización del manual

El manual proporciona instrucciones de mantenimiento del producto, así como aspectos técnicos.

Se debe establecer un programa de mantenimiento y de controles periódicos e identificar un encargado de referencia. El sujeto que se encarga del mantenimiento ordinario del dispositivo debe garantizar los requisitos básicos que prevé el fabricante en las instrucciones para el uso. Se recomienda que el sujeto verifique al menos cada 6 meses si hay manuales de usuario actualizados disponibles o si hay algún cambio relacionado con su producto. Esta información está disponible gratuitamente en el sitio web <http://promeba.com/>.

Es aconsejable que, las actividades de mantenimiento queden registradas y documentadas con los informes de intervención técnica relacionados y éstos mantenerlos al menos durante 10 años a partir del final de vida útil del dispositivo y deberá ponerse a disposición de las Autoridades competentes y/o del fabricante, cuando la soliciten.

No altere ni modifique de ninguna manera el producto; cualquier interferencia de este tipo podría causar fallos de funcionamiento y lesiones al paciente y/o al operario.

Usar solo componentes/repuestos y/o accesorios originales o aprobados por PROMEBA para efectuar todas las operaciones sin causar alteraciones o modificaciones en el dispositivo; de lo contrario, se declina cualquier responsabilidad por el funcionamiento.

### 02.2. Atención al cliente

Para obtener información sobre la interpretación correcta del manual de mantenimiento comuníquese con el servicio de atención al cliente de Promeba T. 93 837 12 00, móvil: +34 608 15 31 93, correo electrónico: [promeba@promeba.com](mailto:promeba@promeba.com) o escriba a PROMEBA, S.L. - Ctra C-16 Km 59.5 · 08650 Sallent (Barcelona) · SPAIN.

Siempre que quiera comunicar cualquier asunto relacionado con un producto, se le pedirá la referencia del producto (**REF**) y el número de serie (**SN**). Se recomienda encarecidamente conservar la etiqueta que contiene esta información y que se encuentra en el embalaje original y adherida al producto.

### 02.3. Etiquetado

Cada producto incorpora una etiqueta de identificación, colocada en el propio dispositivo y/o en el embalaje original del producto. Nunca debe quitarse ni cubrirse. Esta etiqueta incluye los datos de identificación del fabricante (**▲**), el código / referencia (**REF**) del producto, la fecha de fabricación (**☞**), el número de serie (**SN**), el código UDI-PI (**UDI**) y el distintivo CE (**CE**). Debe conservar esta etiqueta para que pueda informar.

## 03 ADVERTENCIAS

### 03.1 Advertencias generales

1. El producto debe ser utilizado únicamente por personal capacitado, que haya asistido a una formación específica para este dispositivo y no para productos similares.
2. Establecer un programa de mantenimiento y de controles periódicos e identificar un encargado de referencia. El sujeto que se encarga del mantenimiento ordinario del dispositivo debe garantizar los requisitos básicos que prevé el fabricante en estas instrucciones para el uso. Se recomienda que el sujeto verifique al menos cada 6 meses si hay manuales de usuario actualizados disponibles o si hay algún cambio relacionado con su producto. Esta información está disponible gratuitamente en el sitio web <http://promeba.com/>.
3. Todas las actividades de mantenimiento deben registrarse y documentarse con los informes de intervención técnica relacionados y la documentación deberá mantenerse al menos durante 10 años a partir del final de vida útil del dispositivo y deberá ponerse a disposición de las Autoridades competentes y/o del fabricante, cuando la soliciten.
4. Promeba, S.L. está siempre a su disposición para planificar formaciones de productos.
5. En caso de dudas sobre la correcta interpretación de las instrucciones, póngase en contacto con Promeba, S.L. para cualquier aclaración necesaria.
6. Antes de cada uso del dispositivo, se debe verificar el perfecto estado de funcionamiento del dispositivo como se especifica en el manual de instrucciones. Si se detectan daños o anomalías que puedan influir de alguna manera en el correcto funcionamiento y la seguridad del dispositivo, del paciente y/o del usuario, el dispositivo debe retirarse inmediatamente del servicio y ponerse en contacto con el fabricante.
7. Si se detecta algún fallo o funcionamiento incorrecto del dispositivo, se debe sustituir inmediatamente por un artículo similar para que los procedimientos de inmovilización y rescate estén garantizados sin ninguna interrupción.
8. No altere ni modifique de ninguna manera el producto; cualquier interferencia de este tipo podría causar fallos de funcionamiento y lesiones al paciente y/o al operario.
9. El producto no debe ser manipulado de ninguna manera (modificación, ajuste, adición, sustitución). En tales casos, se negará toda responsabilidad por cualquier mal funcionamiento o lesiones causadas por el propio producto; además, la certificación CE y la garantía del producto se considerarán nulas.
10. Usar solo componentes/repuestos y/o accesorios originales o aprobados por PROMEBA para efectuar todas las operaciones sin causar alteraciones o modificaciones en el dispositivo; de lo contrario, se declina cualquier responsabilidad por el funcionamiento
11. Asegúrese de que se toman todas las precauciones necesarias para evitar los peligros que pueden surgir como resultado del contacto con sangre o fluidos corporales.

### *03.2 Advertencias específicas*

1. Utilice solo accesorios/repuestos que sean originales o aprobados por Promeba, S.L. al realizar cualquier operación para no causar ninguna alteración o modificación en el dispositivo, de lo contrario no asumimos ninguna responsabilidad por el correcto funcionamiento o daño resultante del dispositivo al paciente o al operador y la garantía se considerará nula, así como la conformidad con el Reglamento 2017/745.
2. Dentro de la ambulancia, coloque y ajuste el dispositivo teniendo cuidado de no obstruir otras partes u otros equipos. Se recomienda no abrir el equipo dentro de la ambulancia, sino realizarlo en el exterior del vehículo.
3. No use lejía para desinfectar el producto. Use un desinfectante con base hidroalcohólica y lave con agua.
4. El dispositivo y todos sus componentes, después del lavado, deben dejarse secar completamente antes de guardarlos. No usar secadoras para secar el dispositivo.
8. No utilice el dispositivo si está perforado, deformado o con signos de pérdida de integridad.
11. La condensación, el agua, el hielo y las acumulaciones de polvo pueden afectar el correcto funcionamiento del dispositivo, haciéndolo impredecible.
12. Las actividades de desinfección deben ser realizadas de conformidad con los parámetros de ciclo validados, indicados en las normas técnicas específicas.
13. Sustituya las ruedas por piezas originales y, en caso de que no se pueda, detener el dispositivo.

### 04.1 Partes principales

PC9017-00000 CONJUNTO CAMILLA PC-901/7

PC9027-00000 CONJUNTO CAMILLA PC-902/7

PC9217-00000 CONJUNTO CAMILLA PC-921/7

PC9227-00000 CONJUNTO CAMILLA PC-922/7

Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES	Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1	Colchón	7	Maneta roja desbloqueo patas delanteras
2	Cinturones	8	Maneta verde desbloqueo patas traseras
3	Patas delanteras	9	Manetas telescópicas
4	Patas traseras	10	Ruedas de ataque
5	Frenos	11	Anclaje 10G
6	Ruedas traseras con posibilidad de bloqueo		



04 DESCRIPCIÓN PRODUCTO REV. 2025/09

PC9117-00000 CONJUNTO CAMILLA PC-911/7 PERFORMANCE

PC9127-00000 CONJUNTO CAMILLA PC-912/7

PC9130-00000 CONJUNTO CAMILLA PC-913

Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES	Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1	Colchón	7	Maneta roja desbloqueo patas delanteras
2	Cinturones	8	Maneta verde desbloqueo patas traseras
3	Patas delanteras	9	Manetas telescópicas
4	Patas traseras	10	Ruedas de ataque con Ergo-Load
5	Frenos	11	Anclaje 10G
6	Ruedas traseras con posibilidad de bloqueo	12	Sistema Quick Lock System



PC9510-00000 CONJUNTO CAMILLA PC-951 FOWLER  
 PC9520-00000 CONJUNTO CAMILLA PC-952 FOWLER



Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES	Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1	Colchón	7	Maneta roja desbloqueo patas delanteras
2	Cinturones	8	Maneta verde desbloqueo patas traseras
3	Patas delanteras	9	Manetas telescópicas
4	Patas traseras	10	Ruedas de ataque
5	Frenos	11	Anclaje 10G
6	Ruedas traseras con posibilidad de bloqueo	12	Sistema Quick Lock System



### 04.2 Partes principales (accesorios)



**PA5351-00000 CONJUNTO CIERRE 3 PUNTOS PA-5351**

Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1	Maneta ergonómica de desbloqueo
2	Adhesivo texturado antideslizante
3	Estructura tubular. Cierre adaptable a cualquier camilla

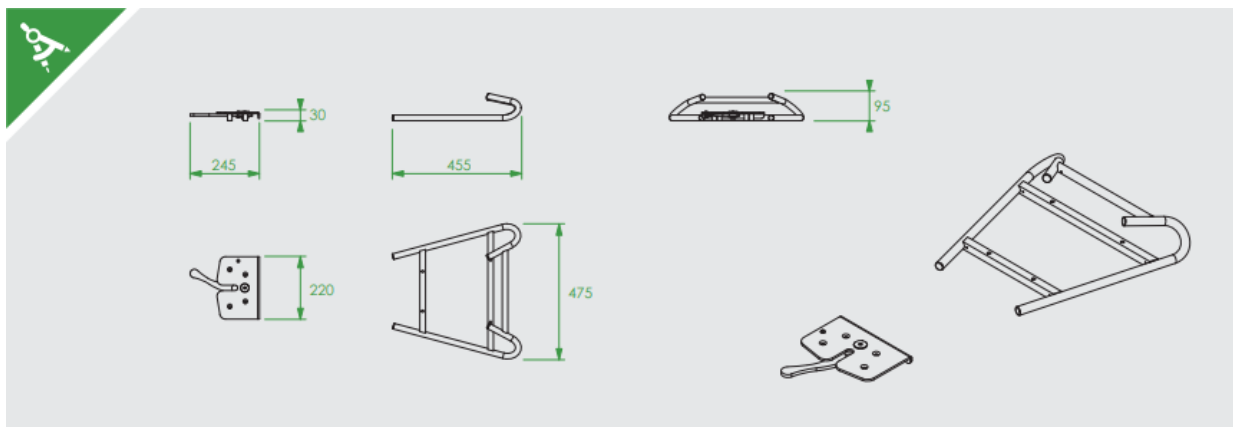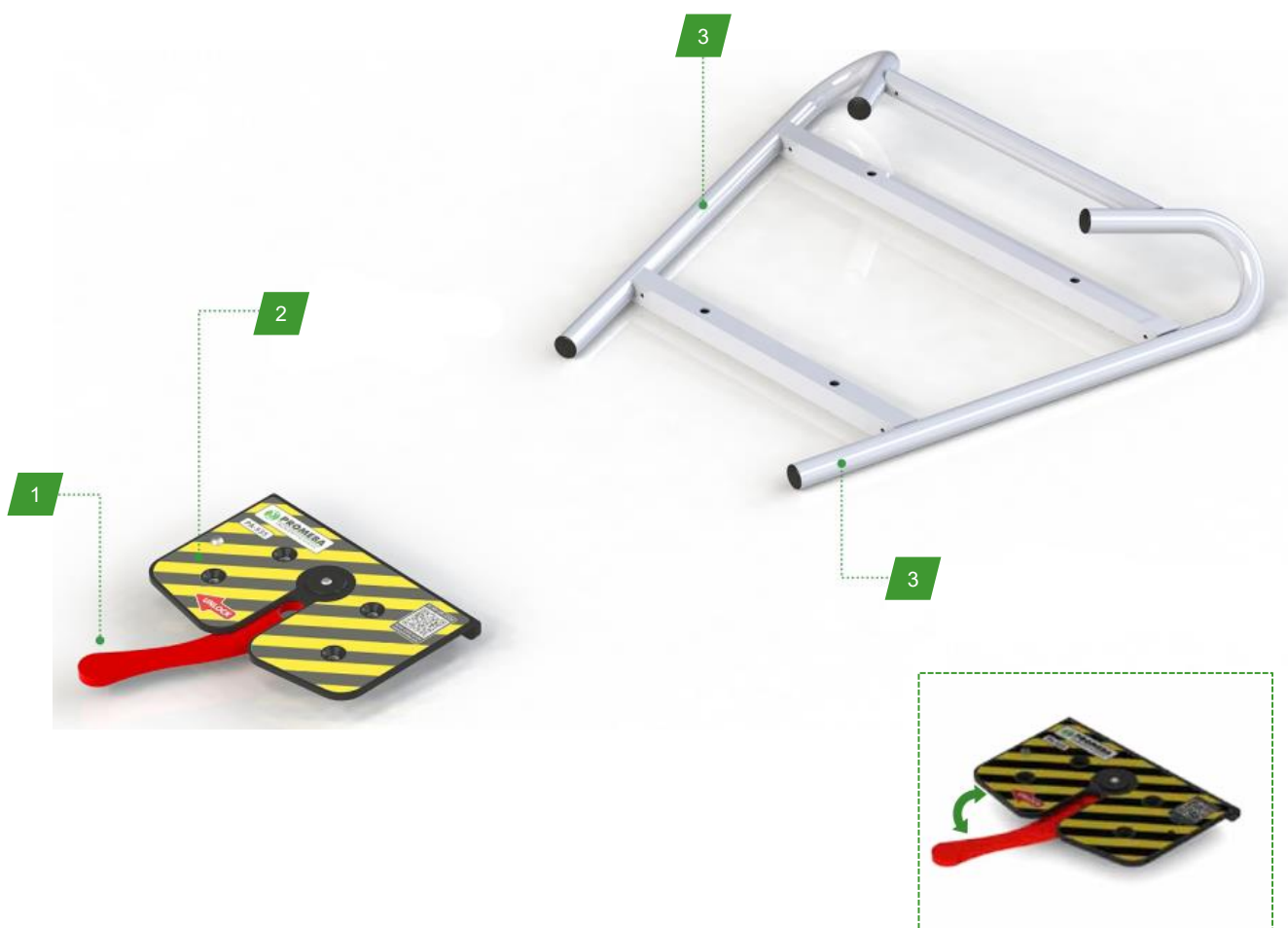



PA5352-00000 CONJUNTO CIERRE 3 PUNTOS PA-5352

Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1	Maneta ergonómica de desbloqueo
2	Adhesivo texturado antideslizante
3	Ganchos de anclaje

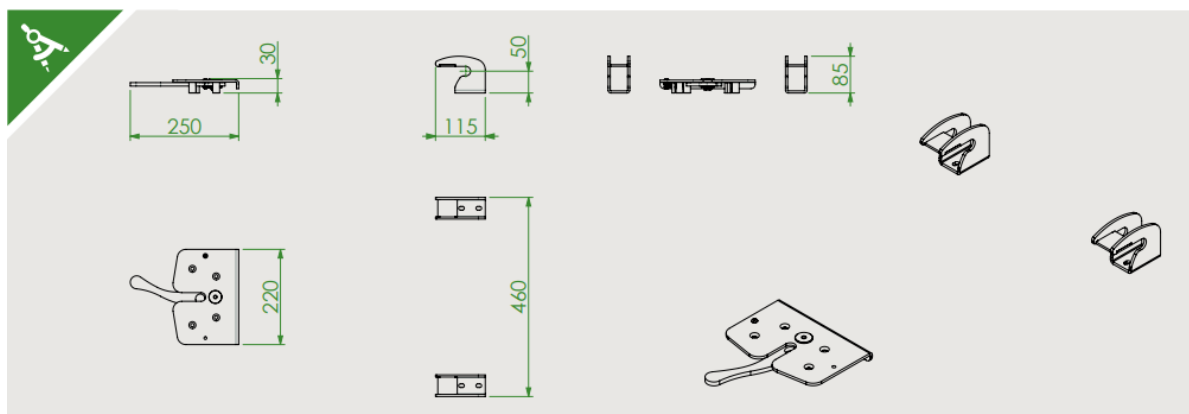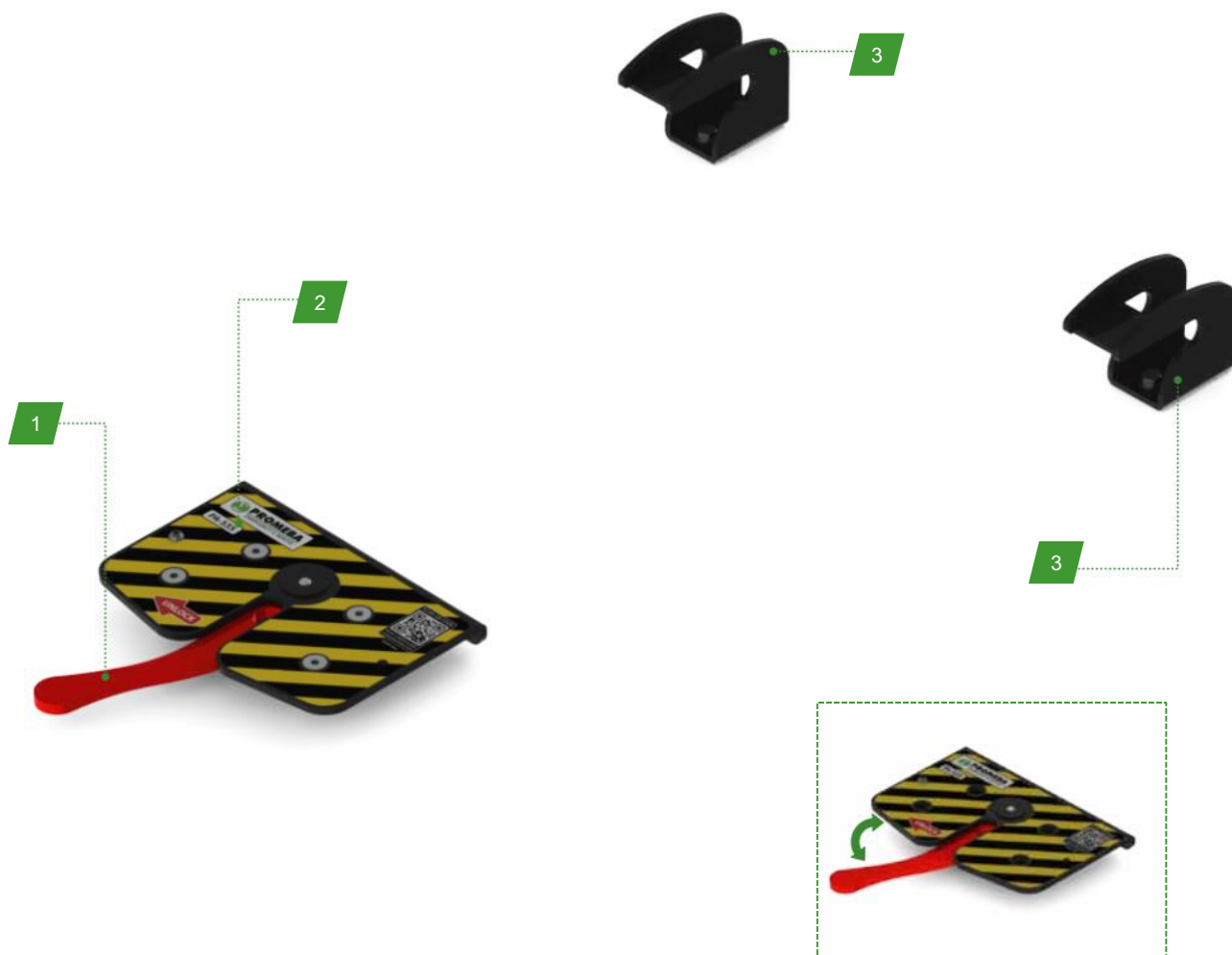

PA5500-00000 CONJUNTO CIERRE UNIVERSAL PA-550

Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1	Estructura tubular con maneta y ganchos
2	Adhesivo texturado antideslizante

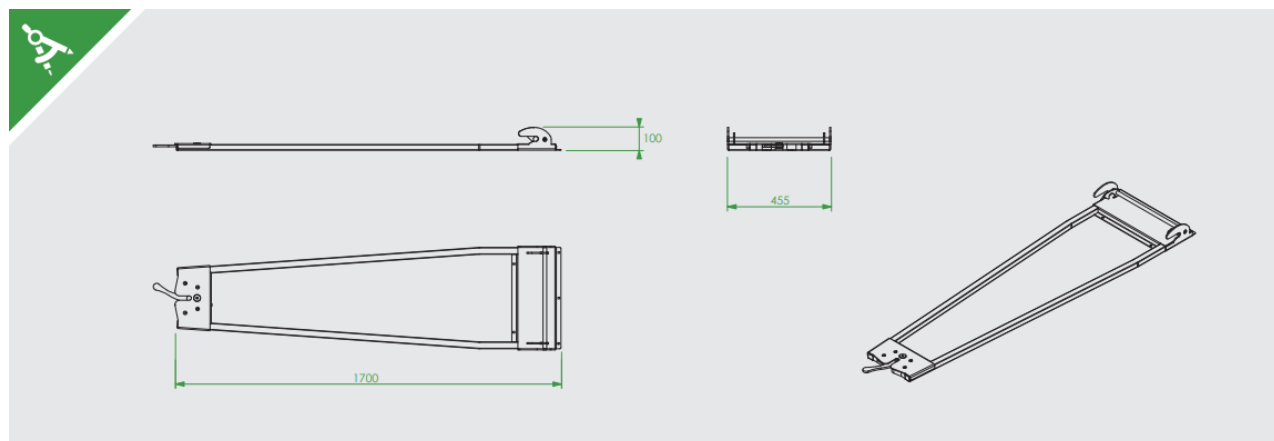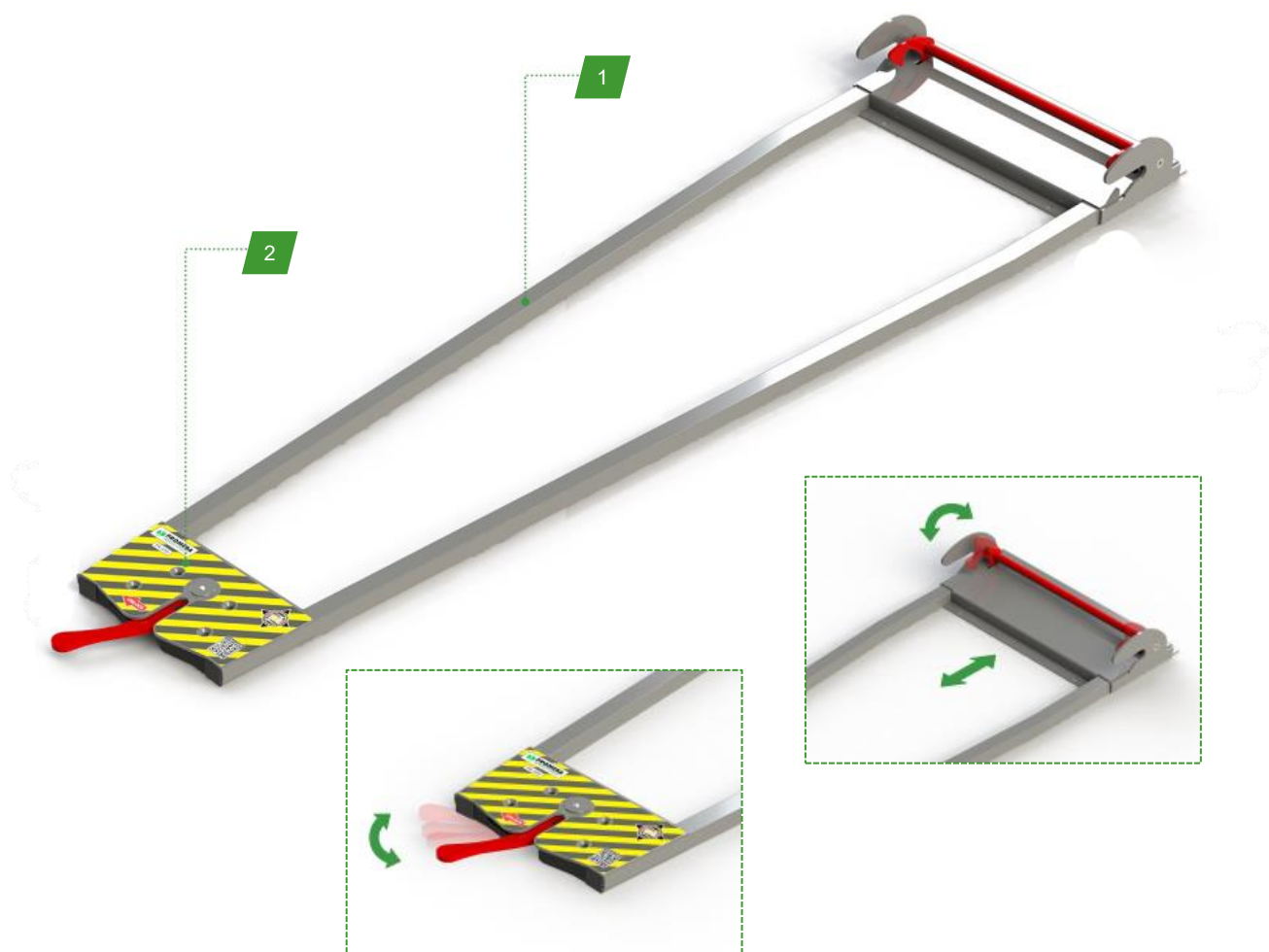

## 05 MANTENIMIENTO

### 05.1. ASPECTOS GENERALES

La camilla debe ser revisada antes de cada uso para revelar cualquier anomalía de funcionamiento y/o daños causados por el transporte y/o almacenamiento. En particular, verifique:

- Funcionalidad general del dispositivo.
- Limpieza del dispositivo (recuerde que la falta de limpieza puede provocar contagio de infecciones).
- Ausencia de cortes, agujeros, roturas en la estructura, incluidos los cinturones.
- Correcta fijación de todas las tuercas, pernos y tornillos.
- Correcta fijación de los cinturones a la camilla.
- Funcionamiento correcto del cierre de los cinturones.
- Estado de las partes móviles, ruedas y cinturones.
- No hay tubos ni chapas metálicas que presenten dobleces o grietas.
- La bandeja de la camilla no presenta daños ni fisuras estructurales.
- Las soldaduras están intactas, sin grietas ni roturas.
- Las ruedas están fijadas de forma segura, son estables y funcionan correctamente.
- Las ruedas están libres de suciedad o escombros
- Los frenos funcionan correctamente
- Las manetas de transporte abren, cierran y se bloquean correctamente.
- Las empuñaduras telescópicas abren, cierran y se bloquean correctamente
- Presencia de todo el etiquetado
- Lubricación de partes móviles.
- El vehículo está equipado con un sistema de sujeción para la camilla.

Si se cumplen las condiciones anteriores, el dispositivo puede considerarse listo para su uso; de lo contrario, debe retirarse inmediatamente del servicio y ponerse en contacto con el fabricante.

## 05 MANTENIMIENTO

### 05.2. Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
Empujando la camilla contra la plataforma de carga, las patas no se pliegan.	No se ha accionado la maneta correctamente o el cable metálico debajo de la camilla no transmite los comandos.	Accione completamente la palanca. Si el problema no se soluciona, compruebe que el cable está transmitiendo el movimiento mirando debajo de la camilla. Si no lo hace correctamente, contacte con el servicio técnico.
Durante el transporte del paciente es difícil mover la camilla.	Puede haber una obstrucción en las ruedas: los frenos todavía están bloqueados o hay algún elemento externo bloqueándolas.	Desbloquee los frenos o compruebe que no hay ningún elemento que las bloquee. Compruebe el estado de las ruedas.
Daño estructural.	Uso inadecuado u operadores no capacitados adecuadamente.	Ponga fuera de servicio la camilla inmediatamente y contacte con el servicio técnico.

## 06 MANTENIMIENTO GENERAL

### 06.01. Limpieza


Es fundamental mantener limpio el equipo para asegurar un correcto uso y durabilidad del conjunto. Se debe realizar una limpieza a fondo periódicamente, especialmente en áreas expuestas a suciedad que puedan acumular suciedad como esquinas o agujeros.

No utilice sistemas de limpieza de alta presión, ni lejía para desinfectar el producto, pueden dañarlo. En su lugar, use un desinfectante con base de hidroalcohólica, lávelo con agua y déjelo secar naturalmente, no use fuentes de calor directo para secar.

El incumplimiento de las operaciones de limpieza puede conducir al riesgo de infecciones cruzadas debidas a la presencia de secreciones y/o residuos. Durante todas las operaciones de control y desinfección, el operador debe usar equipos de protección individual adecuados, como guantes, gafas, etc.

Cuando el procedimiento de limpieza incluya algún producto desinfectante, seguir atentamente las instrucciones del fabricante del producto utilizado en lo referente a la modalidad de aplicación y tiempo de contacto. Asegúrese de haber tomado todas las precauciones necesarias para garantizar que no haya riesgos de infección cruzada o contaminación de pacientes y operadores.

**ASEGÚRESE DE MANTENER LAS ÁREAS QUE SE INDICAN EN LAS FIGURAS DE LA DERECHA LIBRES DE AGUA Y HUMEDAD. TENGA ESPECIAL CUIDADO DE NO MOJARLAS MIENTRAS LAVA LA CAMILLA.**

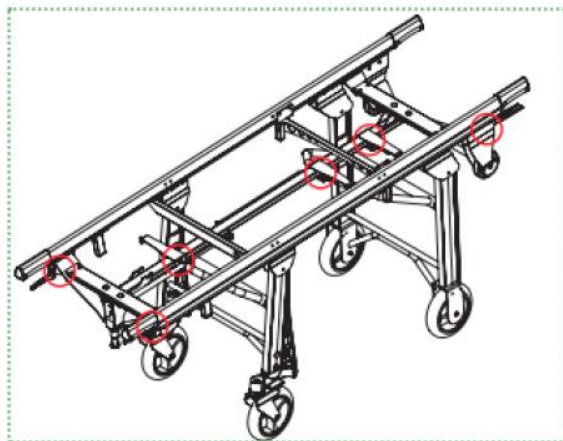

No realizar la correcta rutina de limpieza podría aumentar el riesgo de infección cruzada, por presencia de fluidos y/o residuos corporales.

El operador siempre debe usar protección personal adecuada, como guantes y mascarilla, etc., durante todos los procedimientos de verificación y limpieza.

### 06.02. Lubricación y engrase

En general toda parte móvil deberá engrasarse. Nuestros productos salen de fábrica completamente engrasados y lubricados, no obstante, es posible que con el tiempo y uso del producto los elementos se desengrasen, bien por pérdida de lubricación o bien por suciedad.

Limpie y engrase periódicamente las zonas afectadas según las especificaciones del fabricante. Compruebe que no haya piezas flojas, faltantes o desgastadas.

Inspeccione periódicamente todos los elementos móviles para asegurarse que los componentes están apretados.

## 06 MANTENIMIENTO GENERAL

### 06.03 Áreas de desgaste

La inspección periódica de los componentes del sistema en busca de signos de desgaste es una medida preventiva que puede reducir las averías. Compruebe especialmente posibles fugas de lubricante, ranuras o cojinetes en mal estado. Debido al uso intenso y continuo de elementos como manetas o palancas es importante examinar periódicamente su correcto funcionamiento.

En caso que se requiera el cambio de un componente desgastado, debe ponerse en contacto con nuestro departamento comercial para obtener más información sobre el pedido de repuestos y su instalación.

La reparación o sustitución de componentes de los productos debe ser efectuada necesariamente por el personal cualificado, es decir, que haya recibido una formación por parte del Fabricante, Promeba S.L. y siempre se deben usar repuestos originales.

Promeba S.L. declina cualquier responsabilidad por cualquier daño, directo o indirecto, que sea una consecuencia de un uso inadecuado de los repuestos y/o de cualquier intervención de reparación efectuada por personas no autorizadas.

### 06.04. Programa de mantenimiento

Aunque la frecuencia de los controles está determinada por factores como las prescripciones legales, el tipo de uso, la frecuencia de uso, las condiciones ambientales durante el uso y el almacenamiento, a continuación se detalla una recomendación sobre el mantenimiento que el equipo de tener para un correcto funcionamiento durante toda su vida útil.

Todas las actividades de mantenimiento y revisión deben registrarse y documentarse con los informes de intervención técnica correspondientes, y la documentación deberá mantenerse al menos durante 10 años a partir del final de vida útil del producto y deberá ponerse a disposición de las Autoridades competentes y/o del Fabricante, cuando la soliciten.

Resumen de mantenimiento	A cada uso	Cuando sea necesario	Cada mes	Cada año	Cada 4 años
Desinfectar	X				
Limpiar		X			
Inspeccionar	X	X			
Lubricar		X		X	
Reemplazar muelles				X	
Reemplazar ruedas					X

## 06 MANTENIMIENTO GENERAL

Tanto para el procedimiento de desinfección como para el de limpieza, se debe de seguir el punto 7.1 de este manual.

Durante el procedimiento de inspección, que se debe realizar después de cada uso, se deben de realizar las siguientes tareas:

- Comprobar que estén presentes todos los componentes.
- Comprobar la integridad del dispositivo, es decir, que no hay roturas, grietas, agujeros ni cortes.
- Comprobar el desgaste del producto siguiendo el apartado 7.3 del presente manual.
- Comprobar que las partes móviles se deslizan correctamente.
- Comprobar que los accesorios previstos estén presentes e intactos y que funcionen correctamente.
- Para algunas condiciones de uso, debido a vibraciones o impactos, determinados elementos pueden perder su par de apriete o propiedades de fijación. Revise periódicamente que no haya elementos sueltos, especialmente en las partes móviles. Inspeccione las conexiones mecánicas que puedan existir. Tenga en cuenta y respete siempre los pares de apriete recomendados.


## 07 RECAMBIOS

Para solicitar un repuesto indicar:


- Número y descripción del conjunto en el que se encuentra la pieza necesaria (ver tabla)
- Señalar la pieza del dibujo, o la zona donde se encuentra.

Siguiendo estas indicaciones, nuestro departamento comercial le facilitará un plano detallado del conjunto para que pueda especificar la referencia del recambio requerido.

Nº	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	Nº	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE
1a	LITERA (LONA)	15	SOPORTE RUEDAS DELANTERAS
1b	LITERA (RESPALDO ALUMINIO)	16	SOPORTE DELANTERO
2	CINTURONES	17	AMORTIGUADOR PRINCIPAL
3	COLCHÓN	18	SOPORTE PATAS TRASERAS
4	MANETA RESPALDO LITERA	19	REPOSAPIÉS
5	RUEDAS DE CARGA	20	GUÍA CAMILLA
6	SOPORTE RUEDAS DE CARGA	21	MANETA VERDE
7	MANETA POSICIÓN INTERMEDIA	22	MANETA ROJA
8	AMORTIGUADOR PATA TRASERA	23	MANETA TELESCÓPICA
9	PATA TRASERA	24	CONJUNTO PERFILES SUPERIORES
10	SOPORTE RUEDA TRASERA IZQUIERDA	25	MANETA QUICK LOCK SYSTEM
11	RUEDAS PRINCIPALES	26	PORTASUEROS
12	SOPORTE RUEDA TRASERA DERECHA	27	BARANDILLAS RECLINABLES
13	PATA DELANTERA	28	ANCLAJE 10G
14	PATÍN PLÁSTICO		

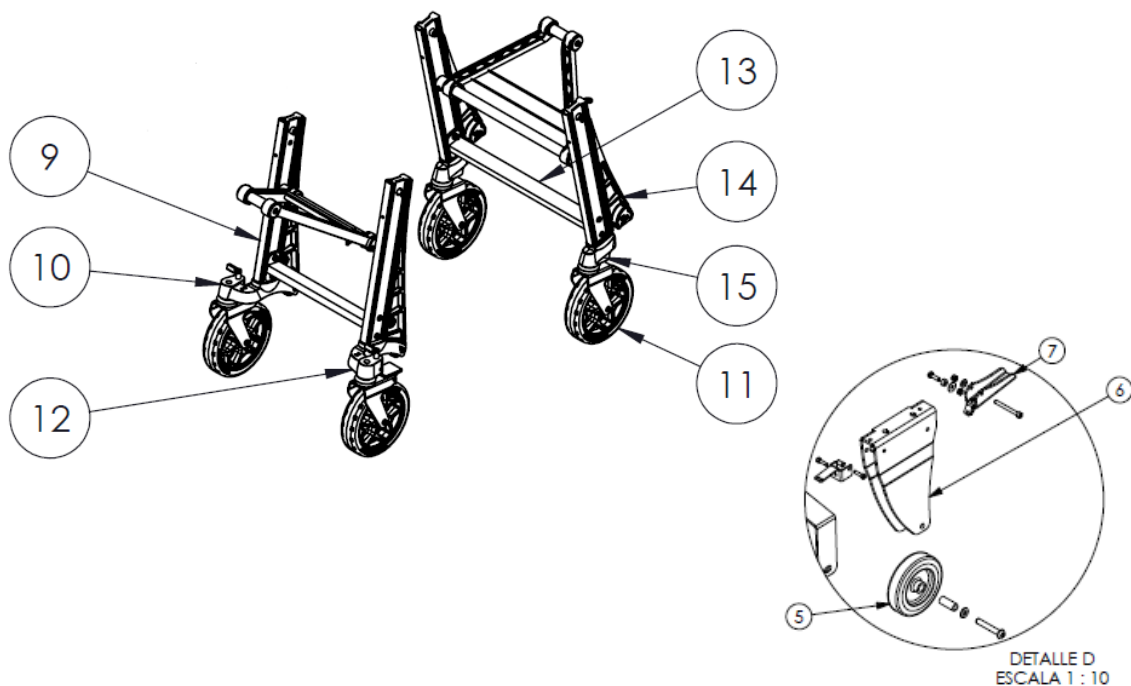

## 07 RECAMBIOS

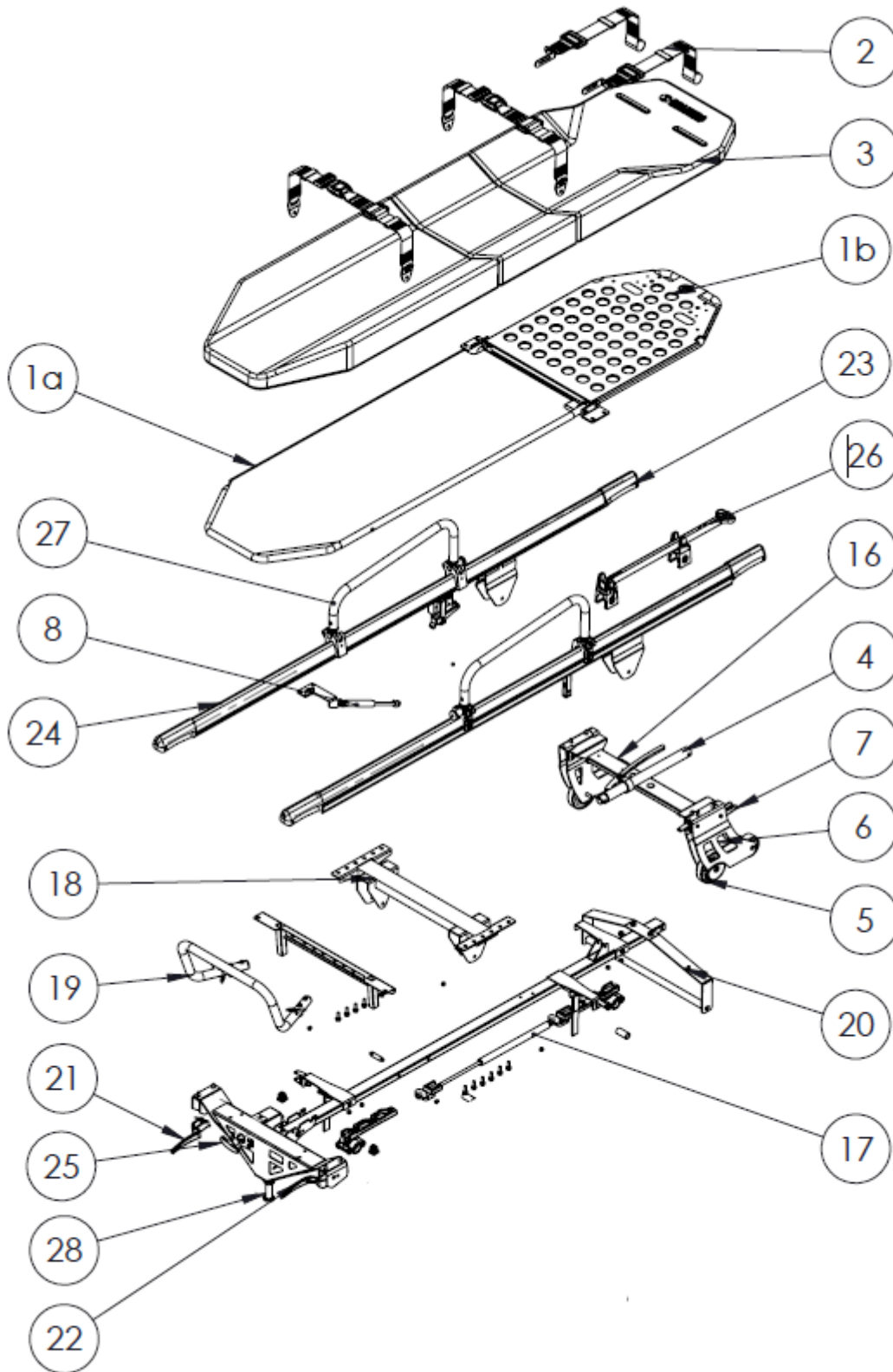

### ***Eliminación***

Cuando los dispositivos ya no sean aptos para su uso, si no han sido contaminados por ningún agente en particular, pueden eliminarse como residuos sólidos normales; de lo contrario, siga las normas de eliminación vigentes.



## 09 A0VISOS LEGALES

- Es posible que este documento contenga imprecisiones técnicas o errores tipográficos.
- Periódicamente se efectúan cambios en la información aquí contenida; dichos cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación.
- Promeba, S.L. se reserva el derecho a realizar, si lo considera oportuno, cualquier modificación o mejora en los productos que se describen en esta publicación.
- Promeba, S.L. puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que aborden temas descritos en este documento. La posesión de este documento no confiere ninguna licencia sobre dichas patentes.
- La información contenida en este documento no afecta ni cambia las especificaciones o garantías del producto de Promeba, S.L.
- Ninguna parte de este documento deberá regir como licencia explícita o implícita o indemnización bajo los derechos de propiedad intelectual de Promeba, S.L. o de terceros.
- Toda la información contenida en este documento se ha obtenido en entornos específicos y se presenta como ilustración. Los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar.
- Promeba, S.L. puede utilizar o distribuir la información que le suministre el cliente de la forma que crea oportuna, sin incurrir en ninguna obligación con el cliente.
- Recuerde, un buen uso y mantenimiento son necesarios para el buen funcionamiento del producto.
- Cada producto lleva incorporada una etiqueta adhesiva identificativa con el número de serie y el modelo. Conserve estos números para

poderlos indicar al distribuidor en caso necesario.



Todos los derechos reservados. Reservado el derecho ha modificaciones sin previo aviso.  
Promeba, S.L. no se considera responsable de los daños causados por la falta o la inexactitud de la información aquí mencionada.

*All rights reserved. Variations can be done whitout notice.  
Promeba, S.L. is to be considered not responsible for damages caused by the lack or the wrongness of the information here mentioned.*



Productos Metálicos del Bages, SL

Ctra C-16 Km 59.5 · 08650 Sallent (Barcelona) · SPAIN

T. 93 837 12 00

[promeba@promeba.com](mailto:promeba@promeba.com) · [www.promeba.com](http://www.promeba.com)